


Obniżenie/wypadanie macicy i pochwy w stopniu:



1 2 3 4

Zalecane w stopniu od 1-3

Zalecane w stopniu 4

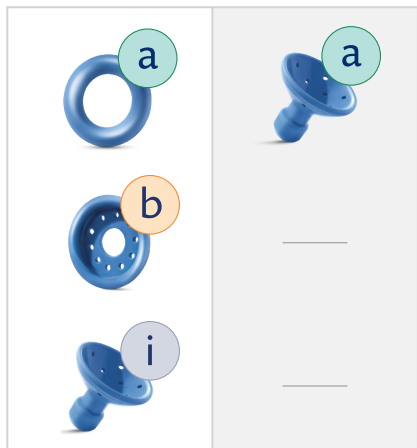


Obniżenie/wypadanie pęcherza moczowego w stopniu:




1 2 3 4

Zalecane w stopniu od 1-3

Zalecane w stopniu 4

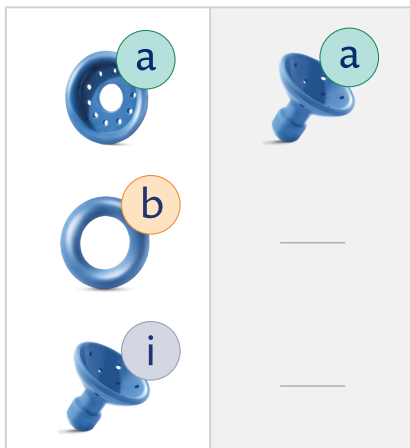


Obniżenie/wypadanie odbytnicy w stopniu:

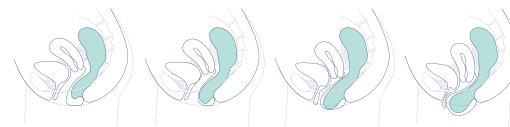

1 2 3 4

Zalecane w stopniu od 1-3

Zalecane w stopniu 4

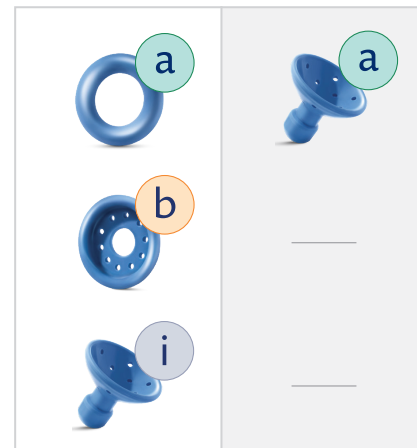

Wszystkie stopnie obniżenia/wypadania narządów rodnych według 4-stopniowej skali Pelvic Organ Prolapse Quantification (POP-Q) System.

Legenda zaleceń do stosowania pessarów ginekologicznych i położniczych:

a Zalecany w pierwszej kolejności **b** Zalecany w drugiej kolejności


i Czasami, przy znacznym obniżeniu (3 stopień) i zbyt szerokim wejściu do pochwy, pessar pierścieniowy lub talerzowy nie utrzymują nacisku obniżających się narządów - wówczas zaleca się stosowanie pessara grzybkowego cienkiego.

Jaki model pessara?



Zadzwoń, nasz doradca chętnie pomoże!
68 500 5000

Obniżenie/wypadanie szczytu pochwy w stopniu:

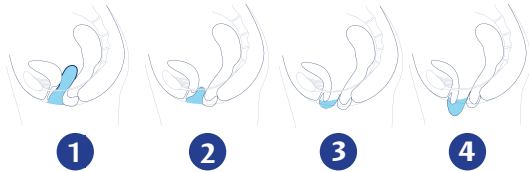

1


2

3


4

Zalecane
w stopniu od 1-3

Zalecane
w stopniu 4

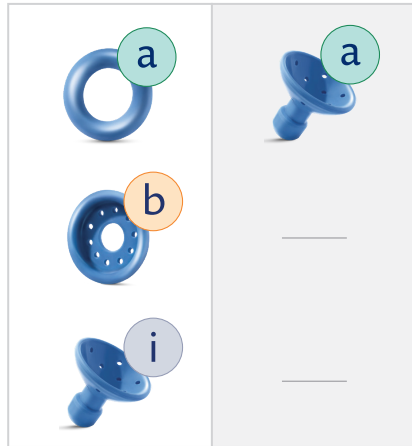


Wysiłkowe i mieszanie nietrzymanie moczu:

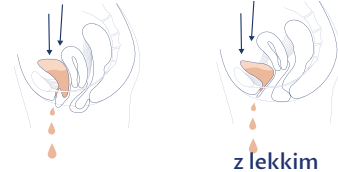

z obniżeniem
macicy
i pochwy


z lekkim
obniżeniem
lub bez obniżenia
macicy i pochwy

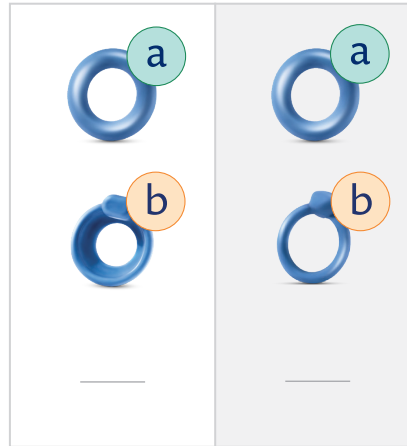

W trakcie ciąży:



Wskazania do
stosowania

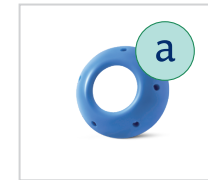


- Niewydolność cięśniowo-szyjkowa
- Zespół bólowy miednicy mniejszej
- Żylaki sromu i kończyn dolnych
- Tyłozgięcie ciężarnej macicy we wczesnej ciąży
- Leczenie niewydolności cięśniowo-szyjkowej przy zastosowaniu szwu okrężnego

Po porodzie:



Wskazania do
stosowania

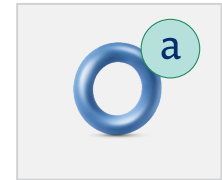

- Poporodowy zespół bólowy miednicy mniejszej
- Profilaktycznie po porodzie w celu ustabilizowania narządu rodnego



**Pierścieniowy
gruby****
rozmiar
od 50-100 mm
co 5 mm



Talerzowy**
rozmiar
od 55-90 mm
co 5 mm



**Grzybkowy
cienki****
rozmiar
od 50-90 mm
co 5 mm



**Cienki cewki
moczowej****
rozmiar
od 55-90 mm
co 5 mm



**Kołnierzowy
cewki moczowej****
rozmiar
od 55-85 mm
co 5 mm



**Kołnierzowy
szyjki macicy
położniczy**
rozmiar
nr. 1, nr. 2, nr. 3

**w celu dobrania odpowiedniego pessara firma dr Herbich umożliwia wymianę pessarów ginekologicznych

Jak dobrać rozmiar pessara grzybkowego cienkiego?

1

Odprowadź część wypadającą narządu do miednicy mniejszej

2

Przy pomocy palców, zmierz **wewnętrzną szerokość pochwy** w dwóch płaszczyznach:

A1

pionowo

A2

poziomo

3

Wylicz średnią wewnętrzną szerokość pochwy **B** z pomiarów **A1** i **A2**


$$(A1 + A2) : 2 = B$$

4


Oblicz potencjalny rozmiar pessara grzybkowego cienkiego **C** odejmując od wyliczonej średniej (**B**) 1 cm

$$B - 1\text{cm} = C$$

1

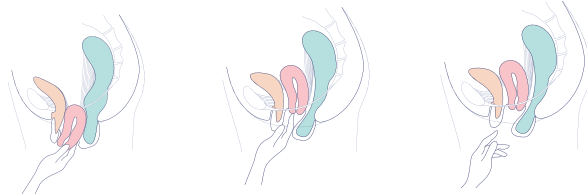

2

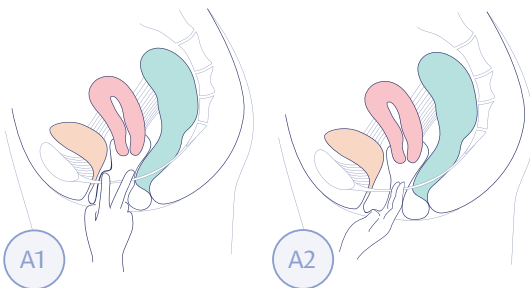

Średnica (**C**)

Legenda

A1 i **A2**: pionowa i pozioma szerokość pochwy

B: wyliczona średnia wew. szerokość pochwy

C: rozmiar pessara grzybkowego

Potrzebujesz pomocy w doborze rozmiaru pessara?



Zadzwoń, nasz doradca chętnie pomoże!

68 500 5000

Jak dobrać rozmiar pessara?

-  Pierścieniowego grubego  Talerzowego  Kołnierzewego cewki moczowej  Cienkiego cewki moczowej

1 Przy pomocy palców, zmierz szerokość wejścia do pochwy w dwóch płaszczyznach:

A1 pionowo A2 poziomo

2 Wylicz średnią szerokość wejścia do pochwy B z pomiarów A1 i A2

$$(A1 + A2) : 2 = B$$


3 Oblicz potencjalny rozmiar pessara C dodając do wyliczonej średniej B:

$$B + 1 \text{ cm} = C$$

gdy dalszy odcinek pochwy ma identyczną średnią szerokość jak wejście do pochwy, lub

$$B + 1,5 \text{ cm} = C$$

gdy dalszy odcinek pochwy jest większy niż średnia szerokość wejścia do pochwy

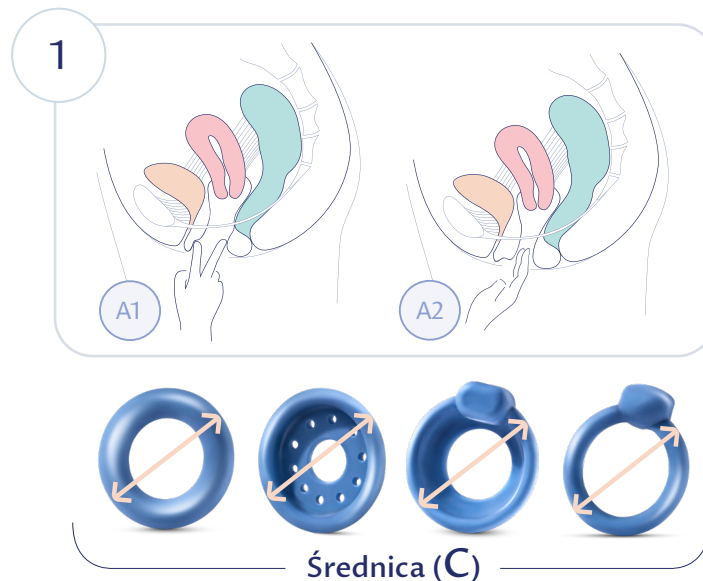

Legenda

- A1 i A2: pionowa i pozioma szerokość pochwy
B: wyliczona średnia wew. szerokość pochwy
C: rozmiar pessara

Jaki rozmiar pessara?



Zadzwoń, nasz doradca chętnie pomoże!
68 500 5000